

Модель коляски	Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом Ortonica Escort 100
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань», Китай, A & I Industries Ltd Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15937
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Веб-сайт	ortonica.ru
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8 (800) 707 - 44 - 52	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом Ortonica Escort 100
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____ подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.



ortonica.ru



service@ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



8 (950) 756-67-25 Whatsapp



КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦОМ

ORTONICA ESCORT 100



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом Ortonica Escort 100 предназначена для пользователя, передвигающегося с сопровождающим лицом. Благодаря малому весу, компактному размеру и складной конструкции коляска удобна для хранения и транспортировки.

КОНСТРУКЦИЯ

- Ручки для сопровождающего, оснащенные системой торможения
- Складная спинка
- Ремень безопасности
- Подножки, съемные, откидные, регулируемые по длине
- Ручные стояночные тормоза
- Откидные опоры для стоп
- Ремни для стоп
- Упоры для сопровождающего лица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная габаритная длина кресла-коляски, ±10 мм	960-1005		
Габаритная высота кресла-коляски, ±10 мм	1010		
Габаритная ширина кресла-коляски, ±10 мм	545	570	595
Высота спинки, ±15 мм	460		
Угол наклона спинки, ±1°	90°		
Ширина сиденья, ±10 мм	430	455	480
Эффективная глубина сиденья, ±10 мм	425		
Материал рамы	Сталь		
Ремни безопасности	Есть		
Масса нетто, кг, не более	13,3		
Максимальная масса пользователя, кг	130		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-коляска	1
2	Паспорт изделия	1
3	Набор инструментов	1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами. Во избежание поломки или опрокидывания коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально. Для складывания коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи
- Металлические поверхности протирать насухо
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой
- Один раз в месяц необходимо произвести:
 - проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений.
- Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение максимальной массы пользователя, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ текстиля в ходе эксплуатации, например растяжение материала, порезы, загрязнения и т.п.