




КРЕСЛО-КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО  
ТУ 3092.20-019- 66445146-2024 TREND 1000 ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:  
КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ОБЛЕГЧЕННОЕ

## ORTONICA **TREND** 1000



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



-  ortonica.ru
-  service@ortonica.ru
-  8 (800) 707-44-52
-  8 (950) 756-67-25 Whatsapp

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии и технические данные
2. Комплектность
3. Ресурсы, срок службы и хранения. Гарантии изготовителя
4. Заметки по транспортированию, хранению, эксплуатации и мерам безопасности
5. Данные изготовителя
6. Гарантийный талон
7. Полезные ресурсы и информация

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 (далее по тексту – кресло-коляска, коляска) - техническое средство реабилитации с широким диапазоном индивидуальных регулировок, позволяющими настроить его под индивидуальные потребности пользователя.

#### Основные технические характеристики

Полная габаритная длина кресла-коляски, ±10 мм	965-1120					
Габаритная высота кресла-коляски, ±10 мм	880-1105					
Габаритная ширина кресла-коляски, ±10 мм	545	565	605	630	655	680
Высота спинки, ±15 мм	450-550					
Ширина сиденья, ±10 мм	380	400	430	450	480	500
Эффективная глубина сиденья, ±10 мм	420-480					
Материал рамы	Алюминий					
Ремни безопасности	Да					
Масса нетто, кг, не более	18					
Максимальная масса пользователя, кг	125					

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019- 66445146-2024 Trend 1000 Вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000	1
2	Паспорт	1

### Скачивайте электронную инструкцию

Скачивайте полную инструкцию к механической инвалидной коляске.



Скачать инструкцию

### Получите подарок за отзыв

Расскажите, что Вам нравится в продукции Ortonica и получите подарок.



Оставить отзыв

### Получите поддержку от государства

Получите компенсацию за коляску через Социальный фонд России (СФР).



Получить компенсацию

## 7. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Мы собрали для Вас всю полезную информацию в одном месте. В разделе Вы найдете QR-коды, обеспечивающие мгновенный доступ к полезным ресурсам, инструкциям и товарам.

### Расширьте возможности вашей коляски

Сделайте использование коляски удобным и безопасным благодаря дополнительным принадлежностям.



Комфорт пользователя



Обслуживание колес



Больше автономности

### Создайте комфортное пространство для жизни

Обеспечьте комфорт в повседневной жизни с помощью практичных решений.



Санитарные стулья



Товары для ванны



Ходунки



Противопрележневые матрасы



Противопрележневые подушки

## Конструкция

- Спинка, регулируемая по высоте.
- Ремни натяжения спинки.
- Подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте и глубине.
- Сиденье, регулируемое по глубине, высоте и по углу наклона.
- Ремень безопасности.
- Ручные стояночные тормоза.
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине.
- Откидные опоры для стоп, регулируемые по углу наклона.
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией, регулируемые по вертикали и горизонтали.
- Передние колеса, регулируемые по вертикали и по углу наклона.
- Съемные антипрокидыватели, оснащенные колесами.

## 3. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кресло-коляски требованиям ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 при условии соблюдения правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение максимальной массы пользователя, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- истирание протектора, проколы и прочие внешние механические воздействия на резиновые изделия, покрышки в ходе эксплуатации;
- износ текстиля в ходе эксплуатации, например растяжение материала, порезы, загрязнения и т.п.

## 4. ЗАМЕТКИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

### Транспортирование

Для транспортировки кресло-коляски вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и укладывается в короб из гофрированного картона или другую тару, исключая повреждение кресло-коляски.

Кресло-коляска в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании короб с креслом-коляской закрепляется и защищается от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Кресло-коляска, упакованное в транспортную тару, должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов для условий транспортирования 3 по ГОСТ 15150.

Запрещается опрокидывать на бок, переворачивать и резко бросать упакованную кресло-коляску во избежание его повреждения.

### Хранение

Условия хранения кресла-коляски, освобожденного от транспортной упаковки, соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150

- температура окружающего воздуха от -50 °С до +40 °С;
- относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.

### Меры безопасности

- При посадке в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть зафиксированы тормозами.
- Во избежание поломки или опрокидывания кресло-коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.
- Запрещается использовать кресло-коляску с неисправными тормозами.
- Перед посадкой в кресло-коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное.
- Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек.

### Подготовка к эксплуатации

- Эксплуатацию кресла-коляски необходимо осуществлять согласно Инструкции по эксплуатации.
- Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения его в рабочее состояние нажмите на верхние трубы механизма складывания вниз, до полного натяжения сидения, установите подножки в крепления на раме и откиньте вниз опоры для стоп.
- Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
- Для складывания кресла-коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

### Техническое обслуживание

- Необходимо очищать поверхность кресла-коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- Один раз в месяц необходимо произвести:
  - проверку исправности тормозных механизмов;
  - проверку затяжки резьбовых соединений;
  - проверку давления в шинах колес.
- Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников.

## 5. ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модель коляски	Кресло-коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019- 66445146-2024 Trend 1000 Вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес производства	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11/40
Юридический адрес	396310, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационное удостоверение	РЗН 2025/24593
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Веб-сайт	ortonica.ru
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8 (800) 707- 44 - 52	

## 6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Кресло-коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019- 66445146-2024 Trend 1000 Вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен.Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.